



 13-99670-5656  
microchipanimal@sterf.com.br

# LEITOR DE MICROCHIP - 180

## MANUAL DE USO

**Este é um scanner de etiqueta de baixa frequência que adota tecnologia de identificação sem fio e suporta a leitura de tags EMID, FDX-B (ISO11784/85). Este scanner usa display OLED de alto brilho que pode ser visto claramente em ambiente de luz brilhante. Este produto é estável com operação simples que é amplamente utilizado para gestão animal, gestão de recursos, inspeção ferroviária etc.**

## PARÂMETROS

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frequência de trabalho</b>       | <b>134.2/125khz</b>                                                       |
| <b>Tags suportadas</b>              | <b>EMID, FDX-B(ISO11784/85)</b>                                           |
| <b>Faixa de Leitura</b>             | <b>2.12mm tag tubo de vidro<br/>&gt;5cm , 300mm tag de orelha&gt;15cm</b> |
| <b>Padrão</b>                       | <b>ISO 11784/85</b>                                                       |
| <b>Tempo de Leitura</b>             | <b>&lt;100ms</b>                                                          |
| <b>Tela</b>                         | <b>OLED de alto brilho de 0,91 polegadas</b>                              |
| <b>Tipo de bateria</b>              | <b>3.7V(bateria de lition)</b>                                            |
| <b>Tipo de porta</b>                | <b>USB 2.0</b>                                                            |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>      | <b>-10°C~50°C</b>                                                         |
| <b>Temperatura de Armazenamento</b> | <b>-30°C~70°C</b>                                                         |



 13-99670-5656  
microchipanimal@sterf.com.br

## OPERAÇÃO


### 1 - Ligar o dispositivo e fazer a leitura.

Pressione o botão para ligar o dispositivo e aperte novamente para leitura.

(((0)))

### 2 - A tag não será exibida na tela se não for detectado uma tag.

Exibira NO TAG no visor.

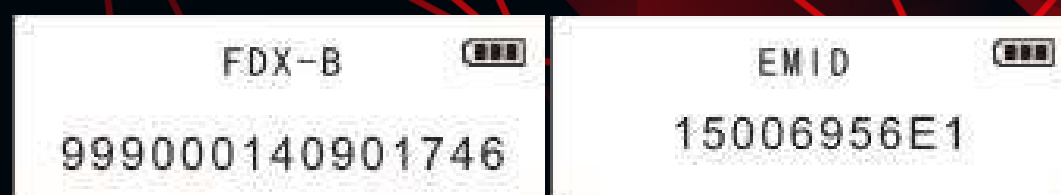

### 3 - O dispositivo pode ser carregado por cabo de dados USB.

Quando o dispositivo estiver conectado por USB, USB será exibido no canto superior esquerdo e no status de carregamento para o estado da bateria.



### 4 - O leitor será desligado após 120 segundos sem funcionar.

